



#### INSTRUÇÕES DE USO – GV HEPES

- O meio GV HEPES já contém suplementação proteica e está pronto para uso.
- Antes de ser utilizado o meio deve ser aquecido a 37°C.
- O meio deve ser utilizado em procedimentos realizados fora da incubadora de CO<sub>2</sub> como lavagem dos oócitos, preparo do sêmen e injeção intracitoplasmática de espermatozoides.

Nota: Para detalhes adicionais sobre o uso deste produto, consultar seus próprios procedimentos de laboratório e protocolo que tenham sido especificamente desenvolvidos e otimizados para seu programa médico individual.