



#### INSTRUÇÕES DE USO – INGASE

- Pré-equilibrar a solução de hialuronidase a 37°C antes de utilizar.
- Colocar os oócitos na solução de hialuronidase por aproximadamente 1 minuto, procedendo à remoção das células do cumulus através da pipetagem contínua.
- Remover imediatamente os oócitos em volume mínimo de solução (excluindo o maior número possível de células do cumulus) e transferir para meio de lavagem.
- Aspirar várias vezes os oócitos com a pipeta de ponta fina para remover células do cumulus e da corona restante.
- Lavar os oócitos desnudados 2 ou mais vezes em solução tampão até estarem completamente desnudados.
- Transferir os oócitos desnudados para o meio de cultivo.

Nota: Para detalhes adicionais sobre o uso deste produto, consultar seus próprios procedimentos de laboratório e protocolo que tenham sido especificamente desenvolvidos e otimizados para seu programa médico individual.

**INGÁMED – Materiais Médico Hospitalares LTDA – EPP**  
CNPJ: 21.016.404/0001-43    Insc. Estadual: 90675653-60