


## INSTRUÇÕES DE USO – PESSÁRIO AM

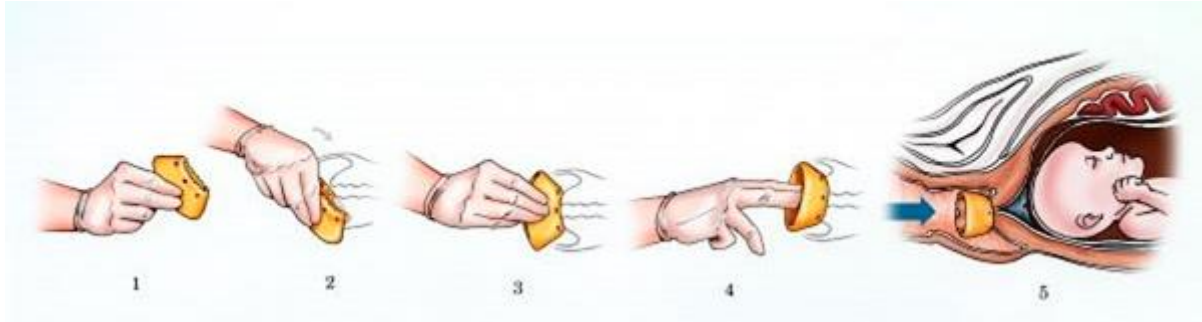

O produto deve ser utilizado em condições assépticas.

1. Ao retirar o PESSÁRIO INGÁMED da embalagem, abrir o envelope na parte superior. Não utilizar tesouras ou objetos cortantes para abrir o envelope evitando danos ao produto.

2. Segurar o PESSÁRIO entre os dedos da mão examinadora (Fig. 1) e inseri-lo no fundo vaginal, posteriormente encaixando-o na cérvix uterina. Encaixe primeiro no lábio posterior da cérvix (Fig. 2) e levante-o de maneira que a cérvix penetre dentro da abertura (Fig 3). Após encaixá-lo, peça que a paciente faça um pequeno esforço (tosse) enquanto estiver segurando com os dedos o pessário (Fig. 4), para assegurar que ele realmente encaixou. A extremidade de menor diâmetro deve estar voltada para o útero, e a extremidade de maior diâmetro, voltada para a abertura vaginal (Fig. 5). Usar apenas pequena quantidade de lubrificante hidrossolúvel.

3. Após a inserção, assegure que a paciente permaneça deitada por 20 ou 30 minutos.

**Remoção:** O PESSÁRIO é removido de forma rápida e fácil, puxando-o suavemente.

O PESSÁRIO deve ser imediatamente removido, na vigência das seguintes circunstâncias:

- Início do trabalho de parto;
- Ruptura espontânea ou artificial das membranas;
- Quando houver indício de hiperestimulação uterina ou contrações uterinas hipertônicas;
- Evidência de sofrimento fetal.