

## 0800- 702 4650 www.ingamed.com.br



## INSTRUÇÕES DE USO - ÓLEO MINERAL (PARAFINA LÍQUIDA)

As instruções a seguir são um procedimento geral para o uso do produto.

O ÓLEO MINERAL INGÁMED é utilizado para cobrir o meio e é recomendado para manipulação e culturas de células em volumes reduzidos, onde as alterações de osmolaridade e pH são críticas.

É um produto pronto para uso, portanto não é necessária sua lavagem prévia.

Antes de ser utilizado, o ÓLEO MINERAL INGÁMED deve ser aquecido e equilibrado a 37ºC em uma incubadora de CO<sub>2</sub> ou atmosfera ambiente dependendo da finalidade.

Esse procedimento deve ser feito, preferencialmente, no dia anterior com uma alíquota do produto coletada.

Deve-se usar uma pipeta estéril e não tóxica. Se forem usados frascos, certifique-se de que as tampas são estejam apertadas, pois isso evitará o equilíbrio do óleo com o gás da incubadora.

• Preparar a placa com o meio conforme procedimento interno do laboratório e cobri-lo com Óleo Mineral Ingámed.

**Nota:** Para detalhes adicionais sobre o uso deste produto, consultar procedimentos e protocolos do laboratório, os quais foram, especificamente, desenvolvidos e otimizados para seu programa individual.

INGÁMED – Materiais Medico Hospitalares LTDA – EPP

CNPJ: 21.016.404/0001-43 Insc. Estadual: 90675653-60

Tel: (44) 3301-6056 / (44) 3025-4650